

Hvordan bytte lunge på vannlivredningsdukke HLR (15-9161FH)



1. Åpne borrelåsen på dukkens bryst



2. Dra ned begge glidelåsene.



3. Ta ut flyteelementet.



4. Åpne lokket til ventilen på den oppblåsbare torsoen.



5. Bruk en finger for å tømme ut luften.



6. Press ut luften på torsoen ved å trykke på kompressionsplaten.



7. Løsne borrelåsen på ansiktet.



8. Skyv ned ansiktet for å ta ut torsoen.



9. Når torsoen er ute, løsne ansiktsdelen.



10. Løsne luftveiskoblingen fra ansiktsdelen.



11. Løsne festet for lungen på den nedre delen av torsoen.



12. Når den nya lungen settes på plass, vær nøye med at dreneringsshullet er nederst!



Av hygieniske årsaker anbefaler SRP å bytte lunge 1 gang pr. dag ved kontinuerlig bruk. (Lungene er testet for ca. 300 innblåsinger.)

Forbruksmateriell kan bestilles hos: www.catch112.no

sjur@catch112.no

Artnr: 15-61FHL

Luftvei/lunge 5-pack tilpasset for vannredningsdukke HLR



Artnr: 15-61FHA

Ansikt med borrelås tilpasset vannredningsdukke HLR

